

Bruksanvisning for **TST** Bowie Dick testpakke.

Bruker Veiledning:

VIKTIG: Browne TST Bowie Dick Testpakke er en damppenetreringstest for daglig bruk i DAMPSTERILISATORER med forvakuum.

1. Forvarm sterilisatoren ved å kjøre en fullstendig syklus.
2. Skriv (ved behov) ned relevant testsyklusinformasjon i feltet som er angitt for dette på utsiden av pakken.
3. Bruk en forvarmet tom sterilisator, og plasser den uåpnede TST Bowie Dick-testpakken horisontalt på en perforert rist mellom 100 og 200 mm over kammerdreneret eller så nær kammerdreneret som mulig.

4. Kjør en Bowie Dick-testsyklus med samme luftfjerningsfaser som brukes til sterilisering av produkter. Syklusen skal kjøres ved 134–137 °C i opptil 3,5 minutter. Ved endt syklus fjernes pakken umiddelbart fra sterilisatoren, og resultatet kontrolleres.

Merk:

- Vær forsiktig, ettersom TST pakken kan være varm.
- Eksponering for 134–137 °C i mer enn 3,5 minutter ugyldiggjør testen.
- Indikatorarket ligger midt i pakken..

REF **2352**



* Illustrasjoner



Ubrukt



Bestått ✓



Feil ✗

Mulig årsak:
Utilstrekkelig luftfjerning.



Feil ✗

Mulig årsak:
Ikke-kondenserende gass i damp
forsyningen.



Feil ✗

Mulig årsak:
Overopphetet damp.



Feil ✗

Mulig årsak:
Dårlig dampkvalitet.

✓ **Godkjent resultat:** Hvis trinnet for fjerning av luft i sterilisatoren fungerer som det skal og muliggjør rask og jevn damppenetrering, vil blekkmønsteret på TST-indikatorarket endre farge fra gul til mørkeblå/lilla.

✗ **Feil resultat:** Hvis det ikke oppstår jevn og rask dampinntrengning, vil mønstret på testarket vise en gul eller brun farge mot midten av testarket.

*Illustrasjoner er typiske eksempler - faktiske resultater kan variere. Fotografier og beskrivelser er kun ment som en generell veiledning, og skal ikke inngå i noen kontrakt eller ordre med mindre det foreligger en skriftlig avtale på dette.

NB: Farger som er vist i publikasjoner er omtrentlige, men er så representative som det er mulig å få ved trykking.

